




MODE D'EMPLOI

SMT baby[®]


SMT môm[®]



Choisir le nez adapté à la morphologie de l'enfant.
Chaque nez est retenu à la réglette par 2 points d'attache.
Détachez le nez choisi de la réglette.

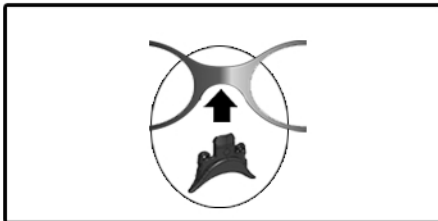


Insérer le nez délicatement dans la monture, à la main
ou à l'aide d'une pince "2 mores".

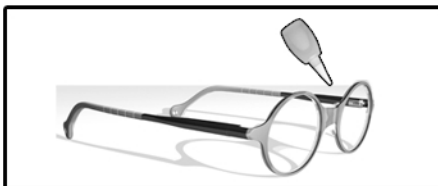

Si nécessaire, mettre un point de colle sur le dessus de
l'encoche nasale, une fois le nez positionné.



Pour retirer le nez de la monture, utiliser la pince située
au milieu de la réglette de nez.
Si vous aviez mis un point de colle, chauffer avant
d'utiliser la pince.

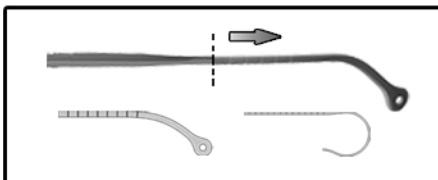

Pour raccourcir les branches : retirer le manchon, couper le
manchon et la pièce métallique à la longueur désirée.
Il est impératif de mettre un point de colle entre le manchon
et la partie plastique de la branche.

Vous pouvez également chauffer la branche pour que le manchon
adhère de façon optimale à la tige.

SMT môm[®]



Pour les montures "SMT Môm" :

En cas de besoin, desserrer le capot en introduisant un tournevis
plat entre le capot et la monture par le bas en tournant le tournevis.
Pour resserrer le capot utiliser soigneusement une pince plate.