




طريقة الإستعمال

SMT *sun*®



ضع كل أنف من الأنوف الستة على المسطرة على أنف الطفل.
اختر الأنف الأكثر تناسبا مع تقاسيم وجه الطفل.
كل أنف مشدود إلى المسطرة من طرفين
إنزع الأنف الذي اخترته من على المسطرة

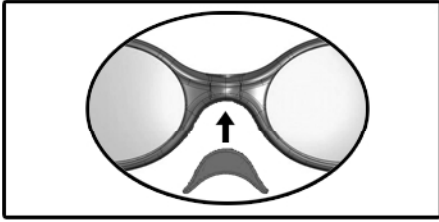


باستخدام اليد أو بالإستعانة بكلاية أدخل برفق الأنف في الحامل.



ممكّن أن تضع نقطة مادة لاصقة تحت الأنف بعد وضعه في مكانه.



لنزع الأنف، إستخدم الكلاية الموجودة في وسط المسطرة.
إذا إستخدمت مادة لاصقة، سخن الحامل قبل إستخدام الكلاية لنزع الأنف.

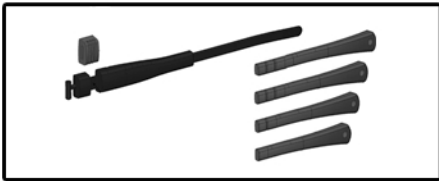

لتقليص طول الذراعين: إجنب الغلاف الخارجي ثم إقطعها و الجزء المعدني حسب الطول المراد.
يجب وضع بعض المصق بين الغلاف الخارجي و الجزء البلاستيكي للذراع.
يمكنك كذلك تسخين الذراع حتى يلتصق الغلاف تماما بالجزء المعدني.